


CEROX® Active Apósitos Térmicos es la línea estudiada para aliviar dolores musculares, reumáticos, lumbares o tortícolis sin necesidad de recurrir a medicamentos. La tecnología multicapa de hidrogel utiliza la terapia de calor y frío.

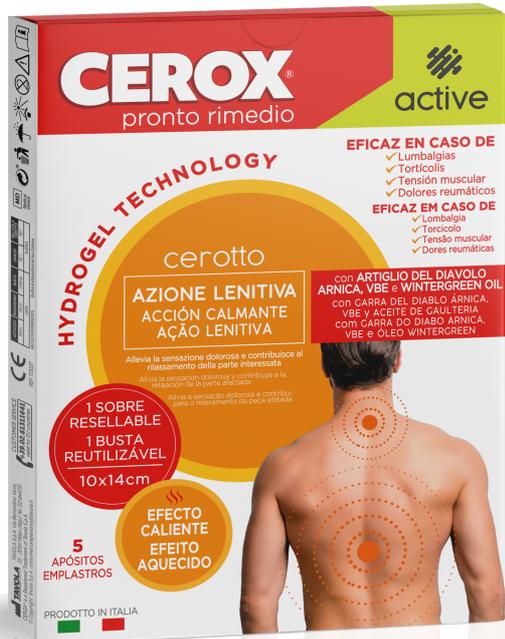

## CEROX® ACTIVE APÓSITO ACCIÓN CALMANTE

Alivia la sensación de dolor en las zonas del cuerpo afectadas por dolores reumáticos y musculares, lumbalgias o tortícolis.

- Ingredientes naturales
- **Garra del diablo** - Alivia las zonas doloridas
- **Árnica** - Alivia las tensiones musculares
- **VBE** - Alivia y permite alternar correctamente la sensación de calor y frío
- **Aceite de gaulteria** - sustancia conocida por sus propiedades calmantes

5  
APÓSITOS

### INSTRUCCIONES DE USO

Extraer el CEROX® Active apósito acción calmante del paquete y retirar la película protectora. Colocar el apósito en la zona dolorida y, si es necesario, cortarlo en la forma y tamaño apropiados. Retirar el apósito levantando suavemente una solapa y tirando.

### FRECUENCIA DE USO


Utilizar el CEROX® Active apósito acción calmante según sea necesario y mantener el apósito en la zona por tratar hasta que se termine la sensación beneficiosa. La duración de efecto de CEROX® Active apósito acción calmante es subjetiva y, en cualquier caso, se agota en cuestión de horas.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

No utilizar en la zona del cuerpo por tratar más de un apósito por cada aplicación. No utilizar CEROX® Active apósito acción calmante si el empaque está dañado. No aplicar sobre piel irritada, independientemente del tipo de lesión. No se debe usar durante el baño o la ducha. No aplicar en los ojos ni alrededor de los mismos y/o sobre las membranas mucosas. No utilizar el producto simultáneamente con otros tratamientos tópicos aplicados en la zona por tratar. En caso de alguna duda sobre el uso de CEROX® Active apósito acción calmante consultar con su médico. Para uso externo. No ingerir. Los apósitos contenidos en el paquete de CEROX® Active apósito acción calmante son desechables y no pueden ser reutilizados. Una vez utilizado, elimine el producto de acuerdo con las reglas normales para la eliminación por separado de los desechos urbanos. NO UTILIZAR LUEGO DE LA FECHA DE CADUCIDAD INDICADA EN EL PAQUETE. Conservar en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz del sol y mantener lejos de las fuentes de calor. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### CONTRAINDICACIONES

CEROX® Active apósito acción calmante no se debe utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a uno o más de los componentes. El apósito contiene derivados del ácido salicílico. EMBARAZO. No existe ningún vínculo entre el uso de CEROX® Active apósito acción calmante y la aparición de eventos adversos durante el embarazo o posibles defectos de nacimiento. Sin embargo, ningún estudio ha analizado específicamente este aspecto, por lo que no se recomienda el uso de CEROX® Active apósito acción calmante durante el embarazo a menos que sea estrictamente necesario. En este caso, contactar con su médico, quien le puede aconsejar con respecto a la decisión.

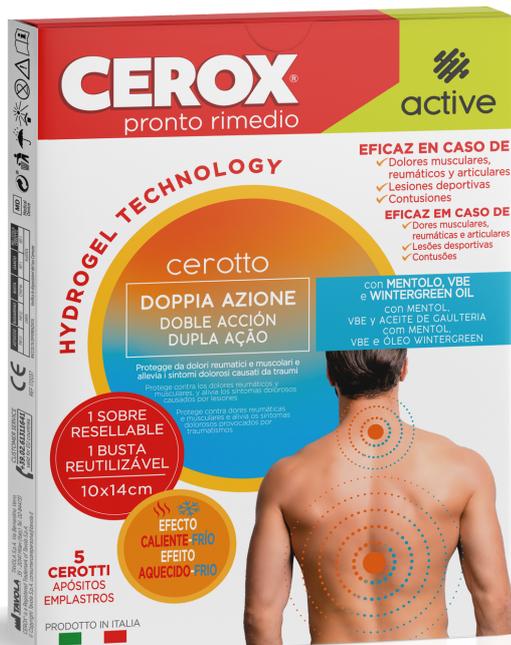

# CEROX® ACTIVE APÓSITO DOBLE ACCIÓN

Protege contra los dolores reumáticos y musculares, y alivia los síntomas dolorosos causados por lesiones. terapia de calor y frío.

- Ingredientes naturales
- Tratamiento de calor y frío
- **VBE** - Alivia y permite alternar correctamente la sensación de calor y frío
- **Aceite** de gaulteria sustancia conocida por sus propiedades calmantes
- **Mentol** - Lleva a cabo una acción refrescante y descongestionante

**5**  
APÓSITOS

## INSTRUCCIONES DE USO

Extraer el CEROX® Active apósito doble acción del paquete y retirar la película protectora. Colocar el apósito en la zona dolorida y, si es necesario, cortarlo en la forma y tamaño apropiados. En las partes del cuerpo donde la aplicación puede ser más difícil (por ejemplo, rodilla, codo, tobillo y muñeca), el apósito se puede fijar aún más a la superficie por tratar con la ayuda de una malla elástica. Retirar el apósito levantando suavemente una solapa y tirando.

## FRECUENCIA DE USO

Utilizar el CEROX® Active apósito doble acción según sea necesario y mantener el apósito en la zona por tratar hasta que se termine la sensación beneficiosa. La duración del efecto frío/caliente es subjetiva y, en cualquier caso, se agota en cuestión de horas.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

No utilizar en la zona del cuerpo por tratar más de un apósito por cada aplicación. No utilizar CEROX® Active apósito doble acción si el empaque está dañado. No aplicar sobre piel irritada, independientemente del tipo de lesión. No se debe usar durante el baño o la ducha. No aplicar en los ojos ni alrededor de los mismos y/o sobre las membranas mucosas. No utilizar el producto simultáneamente con otros tratamientos tópicos aplicados en la zona por tratar. En caso de alguna duda sobre el uso de CEROX® Active apósito doble acción consultar con su médico. Para uso externo. No ingerir. Los apósitos contenidos en el paquete de CEROX® Active apósito doble acción son desechables y no pueden ser reutilizados. Una vez utilizado, elimine el producto de acuerdo con las reglas normales para la eliminación por separado de los desechos urbanos. NO UTILIZAR LUEGO DE LA FECHA DE CADUCIDAD INDICADA EN EL PAQUETE. Conservar en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz del sol y mantener lejos de las fuentes de calor. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## CONTRAINDICACIONES

CEROX® Active apósito doble acción no se debe utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a uno o más de los componentes. El apósito contiene derivados del ácido salicílico. EMBARAZO No existe ningún vínculo entre el uso de CEROX® Active apósito doble acción y la aparición de eventos adversos durante el embarazo o posibles defectos de nacimiento. Sin embargo, ningún estudio ha analizado específicamente este aspecto, por lo que no se recomienda el uso de CEROX® Active apósito doble acción durante el embarazo a menos que sea estrictamente necesario. En este caso, contactar con su médico, quien le puede aconsejar con respecto a la decisión.



## CEROX® ACTIVE KINETIC TAPE

Se puede utilizar e CEROX® Kinetic-Tape como ayuda para el proceso natural de curación, la rehabilitación y la medicina deportiva.

Mejorando la **función muscular** y la **estabilidad articular**, la venda actúa, además, a nivel local sobre la circulación linfática. La correcta aplicación de **CEROX® Kinetic-Tape** proporciona soporte y estabilidad a músculos y articulaciones, sin limitar su movimiento natural y puede disminuir el tiempo de recuperación y aumentar los niveles de la forma física.



### INSTRUCCIONES DE USO

Corte la venda Kinetic-Tape a la longitud deseada. Aplique la venda extendiéndola en función de la zona a tratar y al efecto deseado, con el debido cuidado para mantener lisa y extendida la superficie cutánea subyacente. El vendaje puede utilizarse incluso durante varios días seguidos.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

El adhesivo ha sido probado dermatológicamente, pero en caso de hipersensibilidad individual, suspenda la aplicación o reduzca el tiempo de uso de la venda. En caso de incidentes graves, informar al fabricante y la autoridad competente.

